

Empfehlung zum richtigen Tragen von Masken

<p>Mund-Nasen-Bedeckung (waschbar oder Einmalnutzung):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schützt die Umgebung vor einer möglichen Infektion des Trägers. - Anleitung zum Anbringen bzw. Ablegen der Maske beachten. - Aufgrund der derzeit schwierigen Versorgungslage ist ein verantwortungsvoller Umgang / Gebrauch unumgänglich. 	<p>1. Hände waschen.</p>	<p>2. Sichtprüfung: Defekte bzw. verschmutzte Maske?</p>	<p>3. Ausrichten: Oben biegsamer, steifer Rand (wenn vorhanden) Innenseite: weiß.</p>
<p>4. Mundschutz über Gesicht stülpen.</p>	<p>5. Nasenstück anpassen.</p>	<p>6. Wenn vorhanden: Untere Bänderung befestigen.</p>	<p>7. Maske anpassen: Mund und Nase müssen bedeckt sein.</p>
			