





# Empfehlung zum richtigen Ablegen von Mundschutzmasken

<p>Die Mund-Nase-Bedeckung hygienisch ablegen und entsorgen, so dass keine andere Person damit in Kontakt kommt.</p>	<p>1. Hände waschen</p>	<p>2. Ablegen: Nur an der Befähigung anfangen.</p>
		
<p>3. Einmalmaske hygienisch ablegen und max. eine Schicht lang verwenden.</p> 	<p>4. Wiederverwendbaren Mundschutz hygienisch ablegen und anschließend aufbereiten.</p>  <p>Wiederverwendbaren MNS nach Nutzung hygienisch verpacken und Zuhause aufbereiten</p> <p>Auskochen im Topf mindestens 5 min anschließend trocknen</p> <p>oder</p> <p>Waschen bei min 60°C und trocknen</p>	<p>5. Nach dem Ablegen und Entsorgen erneut gründlich Hände waschen.</p> 